


ACTIOMEDIC® Augenspülungen



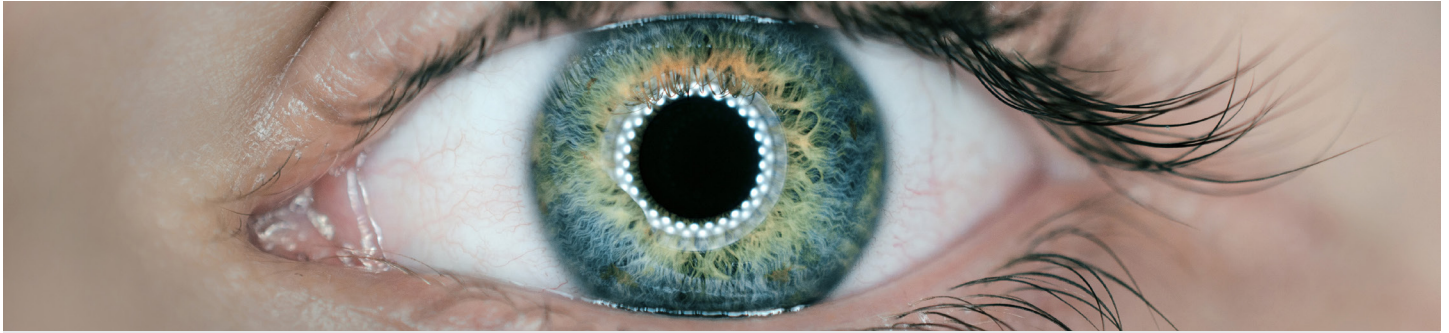

Jede Sekunde zählt: Schutz für Ihr wichtigstes Sinnesorgan

i Wussten Sie schon?

Unser Auge ist ein Meisterwerk der Natur und das wichtigste Sinnesorgan des Menschen. Nur das Zusammenspiel vieler kleiner Teile in diesem sensiblen Organ ermöglicht das Sehen.

Über 90% aller Sinneseindrücke werden über das Auge aufgenommen. Grund genug diesem Sinnesorgan besondere Aufmerksamkeit zu schenken – und für den Fall der Fälle vorzusorgen.

Bereits wenige Sekunden entscheiden maßgeblich, ob die Sehkraft beeinträchtigt wird oder im schlimmsten Fall verloren geht. Bei einer Augenverletzung durch Fremdkörper oder Verätzung kann es um Sekunden gehen. Wenn in einem solchen Fall nicht sofort und konsequent Erste Hilfe geleistet wird, kann das Auge eine dauerhafte irreparable Schädigung erleiden. Augenverletzungen stehen jedes Jahr mit an erster Stelle bei den beruflich angezeigten Unfällen der Berufsgenossenschaften.

Vorsorge und umsichtiges Handeln ist hier von bedeutender Wichtigkeit.

GRAMM medical bietet hier verschiedene Lösungen, die mobil und stationär einsetzbar und auf die Art des Arbeitsplatzes sowie die Größe des Betriebes zugeschnitten sind. Die Vielzahl unserer Produkte garantiert Ihnen eine optimale Lösung, die jedem Arbeitsumfeld gerecht wird.

Unser Augenspül-Konzept ist so entwickelt, dass es jeder Anwender einfach und flexibel – ohne Hilfe – einsetzen kann. **Wir garantieren Ihnen eine sichere und einfache Anwendung.**

Alle **ACTIONOMIC® EYE CARE** Produkte sind CE geprüfte und zugelassene Medizinprodukte und werden stetig strengen Qualitätskontrollen unterzogen. Alle Produkte erfüllen die DIN EN 1515-4 (Augenduschen ohne Wasseranschluss).

Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne.


Gefährdete Arbeitsstätten	Art der Verletzung	Augenspülprodukt / Wirkweise
Werkstätten Metallbearbeitungsbetriebe Industrie Holzbearbeitungsbetriebe u.a. Werften und Bergbau Katastrophenschutz	Mechanische Verletzung durch Fremdkörpereintritt, z.B. Späne, Metallsplitter, Schmutz etc.	Natriumchloridlösung, 0,9% → wäscht Fremdkörper aus dem Auge
Chemische Labore Chemiebetriebe Industrie Polizei Militär Feuerwehr u.a.	Verätzung durch Chemikalien, z.B. Säuren und Laugen	Gepufferte Spüllösung BioPhos®74 → neutralisiert Chemikalien im Auge

Unsere hochwertige **ACTIOMEDIC® EYE CARE** Augenspülflasche

Staubschutzkappe



Ergonomisch geformte Augenschale

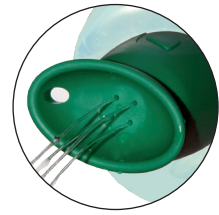

Inhalt: NaCl, 0,9% (steril)



Optional auch im Einzelkarton zum besseren Handling lieferbar → Seite 28

Mehrsprachiges Etikett



Optional auch mit Einzelsiegel lieferbar → Weitere Informationen auf Anfrage.

Anwendungs-Piktogramm



Mindesthaltbarkeitsdatum von 3 Jahren



Ösenwandhalterung bei allen GRAMM Augenspülflaschen

Bestimmungen und Normen zu Augenspülflaschen:

GRAMM medical Augenspülflaschen sind CE-gemerkzeichnet und entsprechen der **DIN EN 15 154-4**. Augenduschen ohne Wasseranschluss und sind Medizinprodukte nach MPG. **Arbeitsschutzgesetz §3: Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zum Arbeitsschutz zu organisieren und geeignete Mittel zur Verfügung zu stellen, um Sicherheit und den Gesundheitsschutz im Betrieb zu verbessern.**

Die Arbeitnehmer haben die zur Verfügung gestellten persönlichen Schutzausrüstungen zu verwenden.

Arbeitsstättenverordnung § 39:

In Abhängigkeit von der Gefahrenart (z.B. beim Umgang mit Säuren und Laugen) **müssen Augenspülflaschen zur Verfügung stehen.**

Gefahrguttransporte: Verpflichtung des Speditionsgewerbes, jeden Gefahrguttransporter mit einem Autoverbandkasten gemäß DIN 13 164 auszustatten, der um eine Augenspülflasche, Schutzbrille u.a. erweitert ist.





Augenspüllösung BioPhos®74

Augenspülung bei Verätzungen - noch schonender für das Auge.



Neue Rezeptur
ohne körperfremde
Bestandteile

Schnelle Neutralisation
da hohe Pufferkapazität

Mehrsprachiges Etikett
in allen europäischen
Sprachen verfügbar

Besonders schonend
pH-neutral und ohne
Konservierungsstoffe

Empfehlung:

Scannen Sie den
QR-Code für mehr
Informationen.



Dies schreibt die Presse über BioPhos74:

Neue Augenspüllösung erlaubt hochwirksame Behandlung.

...Die Augenspüllösung BioPhos74 ist hochwirksam und dabei besonders verträglich. Da sie den extrazellulären Elektrolyt-Verhältnissen (Natrium-Kalium-Anteile) des Gewebes angepasst ist, werden sekundäre Zellschädigungen im Augenbereich weitgehend reduziert.

Quelle: Auszug 8.2011 | 34.Jahrgang | Rettungsdienst | 713

Besondere Vorteile



Wussten Sie schon?

Ihr Auge ist ein Meisterwerk der Natur und Ihr wichtigstes Sinnesorgan. Nur das Zusammenspiel vieler kleiner Teile in diesem Organ ermöglicht das SEHEN.

Bei der Arbeit mit Chemikalien können diese als feste, flüssige oder gasförmige Stoffe in das Auge gelangen.

Daher ist Augenschutz bei der Arbeit sehr wichtig!

Halten Sie **BioPhos®74** bereit, um im Notfall bei Verätzung schnell und effektiv einer Schädigung des Auges entgegenzuwirken.

BioPhos®74 wirkt effektiv und erhält das zelluläre Elektrolytgleichgewicht durch die ausschließliche Verwendung natürlicher Substanzen, die dem physiologischen Stoffwechsel unterliegen und insbesondere dem extrazellulären Natrium-Kalium-Verhältnis entsprechen.

Einsatzgebiete

Die **BioPhos®74** Spüllösung in der 250 ml Flasche ist vielseitig einsetzbar und ein wichtiger Bestandteil der Erste-Hilfe-Ausstattung z.B. für

- **Gewerbebetriebe & Labore**
- **Gefahrguttransporte**
- **Rettungsdienste**
- **Feuerwehr & Katastrophenschutz**
- **Polizei & Militär**

BioPhos®74 ist eine sinnvolle Ergänzung zu stationären Augenduschen, da hochkonzentrierte, ätzende und schnell eindringende Chemikalien eine rasche Interventionszeit erfordern und ungepufferte Spüllösungen nicht genügen, um eine irreversible Zellschädigung zu verhindern.

Wirkungsweise

Die **BioPhos®74** Spüllösung neutralisiert sofort durch ihre Pufferwirkung im physiologischen pH-Bereich von 7,4 und ist besonders schonend durch den Verzicht auf jegliche körperfremde Bestandteile, wie zum Beispiel Konservierungsstoffe. Da sie den extrazellulären Elektrolytverhältnissen des Gewebes angepasst ist, werden sekundäre Zellschädigungen nach der Spülung durch **BioPhos®74** weitgehend reduziert.

Durch die hohe Pufferkapazität wirkt **BioPhos®74** schnell bei Verätzungen des Auges mit starken Säuren und Laugen. Die sterile Spüllösung ist zur schnellen Erstversorgung gebrauchsfertig in der handlichen 250 ml Flasche. **Der integrierte ergonomische Spülkopf ermöglicht eine einfache und korrekte Anwendung** – auch für Laien und Verletzte ohne fremde Hilfe. Nach der Anwendung von **BioPhos®74** sollte mit physiologischer Natriumchloridlösung (0,9%) nachgespült werden.

Wissenswertes zur korrekten Kennzeichnung von Augenspüllösungen nach dem Medizinproduktegesetz und den Normen für Augenspülung:

Mehrsprachiges Etikett in allen europäischen Sprachen verfügbar

Kennzeichnung der Sterilität des Produktes

Kennzeichnung mit CE und Angabe der Überwachungsstelle

Artikelnummer und PZN

Angabe des Herstellers bzw. Inverkehrbringers

Piktogramme zur einfachen und sicheren Anwendung der Augenspülung

Angabe der Chargennummer und der Haltbarkeit der Augenspülung (GRAMM medical: mindestens 3 Jahre)

Anwendung - einfach und schnell

So einfach sind unsere ACTIOMEDIC® EYE CARE Augenspülungen mit ergonomischem Spülkopf anzuwenden:



1. Die Flasche aus der Station nehmen.



2. Staubschutzkappe vom Augenspülkopf entfernen.



3. Augenspülschale um 180° drehen bis Versiegelung bricht.



4. Den Kopf zurücklehnen, Augenschale aufsetzen und spülen.



5. Den Kopf nach vorne beugen und spülen, wenn die Kleidung nicht nass werden soll.

Hinweis:

Bei allen Verschmutzungen soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden. Die Augenspülflasche während des Spülvorgangs leicht drücken. **Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung oder -verschmutzung einzuholen.** Die Spülung sollte während des Transports zum Arzt fortgeführt werden. Flasche nicht wiederverwenden (Infektionsgefahr).

Hier auf Wunsch Ihr Firmen-Logo!



AUGEN-NOTFALLPLAN

Schadstoff-Einwirkung	Empfohlene Spüllösung	Anwendung	Fortsetzung bis zur ärztlichen Behandlung
Fremdkörper z.B. Staub, Schmutz, Metall- und Holzsplitter	Actiomedic Natriumchloridlösung (0,9%)	Augen so lange spülen bis die Fremdkörper herausgewaschen sind.	Spülung mit Actiomedic Natriumchloridlösung (0,9%)
Säureschäden	gepufferte Spüllösung BioPhos®74	Augen mit BioPhos®74 ca. 2,5 Minuten spülen bis die Flasche entleert ist.	Spülung mit Actiomedic Natriumchloridlösung (0,9%)
Alkalische Schäden ausgenommen kalziumhaltige Substanzen, z.B. Kalk und Zement	gepufferte Spüllösung BioPhos®74	Augen mit BioPhos®74 ca. 2,5 Minuten spülen bis die Flasche entleert ist.	Spülung mit Actiomedic Natriumchloridlösung (0,9%)
Sonstige Schäden z.B. Lösemittel und Öle, außer Substanzen, die Silber enthalten	Actiomedic Natriumchloridlösung (0,9%)	Augen so lange spülen bis das unangenehme Gefühl nicht mehr spürbar ist.	Spülung mit Actiomedic Natriumchloridlösung (0,9%)



Entnehmen Sie die Flasche aus der Augenspülstation, bzw. dem Augenspülkoffer



Drehen Sie die Augenschale um 180° in Richtung des Pfeils bis die Versiegelung bricht.



Legen Sie den Kopf in den Nacken und spülen Sie das Auge gleichmäßig.



Beugen Sie sich vor dem Absetzen der Flasche nach vorn um Ihre Kleidung vor Nässe zu schützen.



WICHTIG: Spülen Sie das Auge unabhängig von der Art der Verletzung stets mit einem gleichmäßigen weichen Strahl und halten Sie es dabei weit geöffnet. Drücken Sie die Flasche beim Spülen leicht.

Bei jeder Augenverletzung / -verschmutzung ist unverzüglich ärztlicher Rat einzuholen! Setzen Sie die Spülung unbedingt mit Natriumchloridlösung (0,9%) fort bis ein Arzt konsultiert wurde.

Augenspülflaschen



ACTIOMEDIC® EYE CARE Augenspülflasche mit Natriumchloridlösung 0,9%, 500 ml

Sterile Augenspülflasche mit Natriumchloridlösung, entspricht DIN EN 15 154-4, zum Ausspülen von Fremdkörpern, z.B. Holzsplitter, Späne, Staub, Schmutz. Für den mobilen Einsatz oder zum Nachbefüllen von Station und Koffer, mit ergonomischem Spülkopf und Staubkappe.

Inhalt: 500 ml Maße: 225 x ø 80 mm Haltbarkeit: > 3 Jahre
Spülzeit: ca. 5 Minuten Gewicht: 580 g

Art.Nr.	Ausführung	VE
500.000.05000	500 ml Augenspülflasche mit Staubschutzkappe	6 Stück
500.000.51000	500 ml Augenspülflasche mit Staubschutzkappe im Einzelkarton	12 Stück



ACTIOMEDIC® EYE CARE Augenspülflasche mit Natriumchloridlösung 0,9%, 250 ml

Sterile Augenspülflasche mit Natriumchloridlösung, entspricht DIN EN 15 154-4, zum Ausspülen von Fremdkörpern, z.B. Holzsplitter, Späne, Staub, Schmutz. Für den mobilen Einsatz oder zum Nachbefüllen von Station und Koffer, mit ergonomischem Spülkopf und Staubkappe.

Inhalt: 250 ml Maße: 190 x ø 65 mm Haltbarkeit: > 3 Jahre
Spülzeit: ca. 2,5 Minuten Gewicht: 330 g

Art.Nr.	Ausführung	VE
500.000.02500	250 ml Augenspülflasche mit Staubschutzkappe	10 Stück
500.300.02500	250 ml Augenspülflasche mit Staubschutzkappe im Einzelkarton	12 Stück



ACTIOMEDIC® EYE CARE Augenspülflasche mit gepufferter Spüllösung BioPhos®74, 500 ml

Sterile Augenspülflasche mit phosphatgepufferter Spüllösung (4,9%), bei Verätzungen der Augen durch Chemikalien, hohe Pufferkapazität, besonders schonend durch den Verzicht auf körperfremde Bestandteile und Konservierungsstoffe, entspricht DIN EN 15 154-4. Für den mobilen Einsatz oder zum Nachbefüllen von Station und Koffer, mit ergonomischem Spülkopf und Staubkappe.

Inhalt: 500 ml Maße: 225 x ø 80 mm Haltbarkeit: > 3 Jahre
Spülzeit: ca. 5 Minuten Gewicht: 580 g

Art.Nr.	Ausführung	VE
500.100.74500	500 ml Augenspülflasche BioPhos®74 mit Staubschutzkappe	6 Stück



ACTIOMEDIC® EYE CARE Augenspülflasche mit gepufferter Spüllösung BioPhos®74, 250 ml

Sterile Augenspülflasche mit phosphatgepufferter Spüllösung (4,9%), bei Verätzung der Augen durch Chemikalien, hohe Pufferkapazität, besonders schonend durch den Verzicht auf körperfremde Bestandteile und Konservierungsstoffe, entspricht DIN EN 15 154-4. Für den mobilen Einsatz oder zum Nachbefüllen von Station und Koffer, mit ergonomischem Spülkopf und Staubkappe.

Inhalt: 250 ml Maße: 190 x ø 65 mm Haltbarkeit: > 3 Jahre
Spülzeit: ca. 2,5 Minuten Gewicht: 330 g

Art.Nr.	Ausführung	VE
500.100.74200	250 ml Augenspülflasche BioPhos®74 mit Staubschutzkappe	10 Stück
500.300.74200	250 ml Augenspülflasche BioPhos®74 mit Staubschutzkappe im Einzelkarton	12 Stück



Die neue **ACTIOMEDIC®** Augenspülflasche

TWIN

Ermöglicht die Spülung beider Augen gleichzeitig.

NEU!
im Sortiment

Anpassungsfähig

Ergonomisch geformte Augenschale für beide Augen. Passt sich den Augen optimal an und ermöglicht eine komfortable Spülung.



Gleichzeitige Spülung


Doppelter gleichmäßiger Spülstrahl für eine gleichzeitige und sanfte Spülung beider Augen.



Aussparung für die Nase

Besondere Vorteile

Bereits wenige Sekunden entscheiden in einem Notfall maßgeblich, ob die **Sehkraft beeinträchtigt** wird oder im schlimmsten Fall verloren geht. Wenn in einem solchen Fall nicht sofort und konsequent Erste Hilfe geleistet wird, kann das Auge eine **dauerhafte irreparable Schädigung** erleiden.

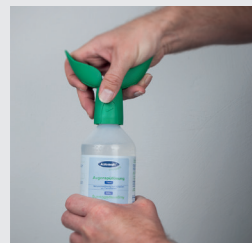

GRAMM medical bietet Ihnen deshalb mit **ACTIOMEDIC® EYE CARE TWIN** eine Augenspülung, mit der im Falle einer Augenverletzung beide Augen gleichzeitig gespült werden können.

Für doppelte Sicherheit und für noch schnellere Hilfe im Notfall.



Augenspülflaschen **TWIN**



ACTIOMEDIC® EYE CARE **TWIN** Augenspülflasche mit Natriumchloridlösung 0,9%

Sterile Augenspülflasche mit Natriumchloridlösung, zum Ausspülen von Fremdkörpern, z.B. Holz- und Metallsplinter, Späne, Staub, Schmutz, entsprechend DIN EN 15 154-4, für den mobilen Einsatz oder zum Nachbefüllen von Station und Koffer, mit ergonomischem Spülkopf zum gleichzeitigen Spülen beider Augen.

Inhalt: 500 ml Maße: 120 x 80 x 210 mm Haltbarkeit: > 3 Jahre
Spülzeit: ca. 2,5 Minuten Gewicht: 580 g

Art.Nr.	Ausführung	VE
500.000.05002	500 ml TWIN Augenspülflasche Natriumchloridlösung	6 Stück



ACTIOMEDIC® EYE CARE **TWIN** Augenspülflasche mit gepufferter Spüllösung BioPhos®74

Sterile Augenspülflasche mit BioPhos®74 gepufferter Spüllösung, zum Behandeln bei Verätzungen durch Chemikalien, hohe Pufferkapazität, entsprechend DIN EN 15 154-4, für den mobilen Einsatz oder zum Nachbefüllen von Station und Koffer, mit ergonomischem Spülkopf zum gleichzeitigen Spülen beider Augen.

Inhalt: 500 ml Maße: 120 x 80 x 210 mm Haltbarkeit: > 3 Jahre
Spülzeit: ca. 2,5 Minuten Gewicht: 580 g

Art.Nr.	Ausführung	VE
500.200.74203	500 ml TWIN Augenspülflasche BioPhos®74	6 Stück



ACTIOMEDIC® EYE CARE **TWIN** Single I oder II Augenspülstation

Augenspülstation mit einer Flasche zur Wandmontage, Flasche gebrauchsfertig und steril mit ergonomischem Spülkopf TWIN für eine gleichzeitige Spülung beider Augen, inkl. Piktogrammtafel und Spiegel, für einfache Handhabung, inkl. Halterung, Augennotfallplan und Montagematerial, je nach Einsatzgebiet mit 500 ml Natriumchloridlösung oder 500 ml gepufferter Spüllösung BioPhos®74.

Spülzeit: ca. 2,5 min Maße: 215 x 80 x 300 mm
Haltbarkeit: > 3 Jahre

Art.Nr.	Ausführung	VE
500.200.30010	TWIN Single I Augenspülstation mit 500 ml Natriumchloridlösung	1 Stück
500.200.30020	TWIN Single II Augenspülstation mit 500 ml BioPhos®74	1 Stück



Die neue **ACTIOMEDIC® Medi2Protect** Augenspülstation

Für eine noch schnellere und effektivere Hilfe im Notfall.

NEU!
im Sortiment



Gut greifbar
Durch den großen Griff im Notfall auch mit Handschuh leicht zu bedienen.

Wassergeschützt



Empfehlung:

Scannen Sie den QR-Code für mehr Informationen.



Integrierter Spiegel

Beheizung
Optional auch beheizbar erhältlich.

Sichtfenster
Damit sofort erkennbar ist, ob die Augenspülstation befüllt und einsatzbereit ist.

Besondere Vorteile

In gefährdeten Arbeitsstätten wie Werkstätten, Metallbearbeitungsbetrieben oder chemischen Laboren müssen Augenspüllösungen lt. Arbeitsstättenverordnung §39 zur Verfügung stehen.

Hier bietet **GRAMM medical** eine **schnell zugängliche, robuste und leicht bedienbare Augenspülstation** zur Wandmontage oder für den mobilen Einsatz. Einen leichten und schnellen Zugriff auf die Augenspülung bietet die komfortable Augenspülstation zur Wandmontage, um im Notfall schnell reagieren zu können.

Die Station bietet Platz für bis zu drei **ACTIOMEDIC® EYE CARE** Augenspüllflaschen, die je nach Bedarf kombiniert werden können.

Einen weiteren und sehr wichtigen Vorteil bietet unsere neue Augenspülstation, indem sie flexibel einsetzbar ist. **An der Wand befestigt** bedeutet sie einen konkreten Anlaufpunkt für Verletzte und Dank der auffälligen Signalfarbe ist sie auch bei eingeschränkter Sicht leicht auffindbar. **Als mobiler Notfallkoffer** kann sie auch in den Gefahrenbereich mitgenommen werden, so dass im Notfall schnell und flexibel direkt am Unfallort Erste Hilfe geleistet werden kann.



Medi2Protect Augenspülstation



ACTIOMEDIC® EYE CARE Medi2Protect I

Schnell zugängliche und leicht bedienbare Augenspülstation in orange, zur Wandmontage oder als mobiler Notfallkoffer zu verwenden, mit Klarsichtfrontscheibe, drei Flaschen gebrauchsfertig und steril mit ergonomischem Spülkopf, inkl. Spiegel für einfache Handhabung, staubdicht, wasserfest und platzsparend, inkl. Montagematerial + Augennotfallplan.

Spülzeit : ca. 15 min (gesamt)
Maße: 35,5 x 11 x 50 cm

Haltbarkeit > 3 Jahre
Gewicht: 2750 kg

Art.Nr.	Ausführung	VE
500.200.20000	Augenspülstation 2 x 500 ml Natriumchloridlösung 1 x 500 ml BioPhos®74	1 Stück



ACTIOMEDIC® EYE CARE Medi2Protect II

Schnell zugängliche und leicht bedienbare Augenspülstation in orange, zur Wandmontage oder als mobiler Notfallkoffer zu verwenden, mit Klarsichtfrontscheibe, drei Flaschen gebrauchsfertig und steril mit ergonomischem Spülkopf, inkl. Spiegel für einfache Handhabung, staubdicht, wasserfest und platzsparend, inkl. Montagematerial + Augennotfallplan.

Spülzeit: ca. 15 min (gesamt)
Maße . 35,5 x 11 x 50 cm

Haltbarkeit: > 3 Jahre
Gewicht: 2750 g

Art.Nr.	Ausführung	VE
500.200.20010	Augenspülstation 3 x 500 ml Natriumchloridlösung	1 Stück



500.200.10000



500.200.10010

ACTIOMEDIC® EYE CARE Medi2Protect TWIN I oder II Augenspülstation

Schnell zugängliche und leicht bedienbare Augenspülstation in orange, zur Wandmontage oder als mobiler Notfallkoffer zu verwenden, mit Klarsichtfrontscheibe, drei Flaschen gebrauchsfertig und steril mit ergonomischem TWIN Spülkopf, inkl. Spiegel für eine einfache Handhabung, staubdicht, wasserabweisend und platzsparend, inkl. Montagematerial + Augennotfallplan, in zwei Ausführungen erhältlich.

Medi2Protect TWIN I

Inhalt: 2 x 500 ml Natriumchlorid
1 x 500 ml BioPhos®74

Spülzeit: je Flasche ca. 2,5 Minuten

Maße: 350 x 110 x 500 mm
Gewicht: 2750 g

Haltbarkeit: > 3 Jahre

Medi2Protect TWIN II

Inhalt: 3 x 500 ml Natriumchlorid

Spülzeit: je Flasche ca. 2,5 Minuten

Maße: 350 x 110 x 500 mm
Gewicht: 2750 g

Haltbarkeit: > 3 Jahre

Art.Nr.	Ausführung	VE
500.200.10000	Augenspülstation TWIN I	1 Stück
500.200.10010	Augenspülstation TWIN II	1 Stück



Augenspülstationen

ACTIOMEDIC® EYE CARE Design-Augenspülstation Medidrop I

Optisch ansprechende und leicht bedienbare Augenspülstation mit Klarsichtdeckel und zwei Flaschen zur Wandmontage, Flaschen gebrauchsfertig und steril mit ergonomischem Spülkopf, inkl. Spiegel und Piktogramm für einfache Handhabung, staubdicht und platzsparend, inkl. Montagematerial + Augennotfallplan.

Inhalt: 2 x 500 ml Natriumchloridlösung 0,9 %

Spülzeit (gesamt): ca. 10 Min

Haltbarkeit: > 3 Jahre

Maße: ca. 27 x 10 x 35 cm (B x T x H)

Art.Nr.	Ausführung	VE
500.101.10010	2 x 500 ml Natriumchloridlösung, 0,9%	1 Stück



ACTIOMEDIC® EYE CARE Design-Augenspülstation Medidrop II

Optisch ansprechende und leicht bedienbare Augenspülstation mit Klarsichtdeckel und zwei Flaschen zur Wandmontage, Flaschen gebrauchsfertig und steril mit ergonomischem Spülkopf, inkl. Spiegel und Piktogramm für einfache Handhabung, staubdicht und platzsparend, inkl. Montagematerial + Augennotfallplan.

Inhalt: 1 x 500 ml Natriumchloridlösung und 1 x 250 ml gepufferte Spüllösung BioPhos®74

Spülzeit:

ca. 5 min. Natriumchlorid,

ca. 2,5 min. BioPhos®74

Maße: ca. 27 x 10 x 35 cm (B x T x H)

Haltbarkeit: > 3 Jahre

Art.Nr.	Ausführung	VE
500.100.10020	1 x 500 ml Natriumchloridlösung, 0,9% + 1 x 250 ml BioPhos®74	1 Stück



ACTIOMEDIC® EYE CARE Augenspülstation Single

Augenspülstation mit einer Flasche zur Wandmontage, Flasche gebrauchsfertig und steril mit ergonomischem Spülkopf und Staubkappe, inkl. Piktogrammtafel und Spiegel, für einfache Handhabung, inkl. Halterung, Augennotfallplan und Montagematerial, in zwei Ausführungen erhältlich, je nach Einsatzgebiet mit 500 ml Natriumchloridlösung oder 250 ml / 500 ml gepufferter Spüllösung BioPhos®74.

Maße: ca. 20 x 30 cm

Haltbarkeit: > 3 Jahre


Art.Nr.	Ausführung	VE
500.000.01190	500 ml Natriumchloridlösung, 0,9%	1 Stück
500.100.01290	250 ml BioPhos®74	1 Stück
500.100.01390	500 ml BioPhos®74	1 Stück



500.000.01190



500.100.01290

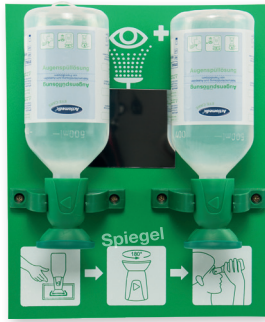

ACTIOMEDIC® EYE CARE Augenspülstation Double I

Augenspülstation mit zwei Flaschen zur Wandmontage, Flaschen gebrauchsfertig und steril mit ergonomischem Spülkopf und Staubkappe, inkl. Halterung zur Wandmontage, mit Spiegel und Piktogramm für einfache Handhabung, inkl. Montagematerial + Augennotfallplan.

Inhalt: 2 x 500 ml Natriumchloridlösung 0,9%

Spülzeit: ca. 10 min (gesamt) Haltbarkeit: > 3 Jahre
Maße: ca. 25 x 30 cm

Art.Nr.	Ausführung	VE
500.000.01100	2 x 500 ml Natriumchloridlösung, 0,9%	1 Stück



ACTIOMEDIC® EYE CARE Augenspülstation Double II

Augenspülstation mit zwei Flaschen zur Wandmontage, Flaschen gebrauchsfertig und steril mit ergonomischem Spülkopf und Staubkappe, inkl. Halterung zur Wandmontage, mit Spiegel und Piktogramm für einfache Handhabung, inkl. Montagematerial + Augennotfallplan.

Inhalt: 1 x 500 ml Natriumchloridlösung 0,9% und
1 x 250 ml gepufferte Spüllösung BioPhos®74

Spülzeit: ca. 5 min Natriumchlorid Maße: ca. 25 x 30 cm
ca. 2,5 min BioPhos®74 Haltbarkeit: > 3 Jahre

Art.Nr.	Ausführung	VE
500.100.01150	1 x 500 ml Natriumchloridlösung, 0,9% + 1 x 250 ml BioPhos®74	1 Stück



500.000.30010

ACTIOMEDIC® EYE CARE Augenspülschrank mit Zusatzausstattung

Eintüriger Verbandschrank aus robustem Stahlblech, pulverbeschichtet, zur Wandmontage, inkl. Augennotfallplan.

Inhalt: Augenspülflaschen (siehe unten, Haltbarkeit: > 3 Jahre) + 1 Augenklappe, 2 Augenkompressen, 1 Heftpflaster, 4 Einmalhandschuhe, 5 Vliestücher.

Maße: ca. 360 x 290 x 145 mm
Farbe: weiß, mit Augenspülung-Symbol



500.000.30020

Art.Nr.	Ausführung	VE
500.000.30010	3 x 500 ml Natriumchloridlösung, 0,9%	1 Stück
500.000.30020	2 x 500 ml Natriumchloridlösung, 0,9% + 1 x 500 ml BioPhos®74	1 Stück



Gürteltasche für 250 ml Augenspülflaschen

Praktische Gürteltasche mit Klettverschluss und Befestigungslaschen für den mobilen Einsatz, schützt vor Verschmutzungen, im Notfall leicht und schnell zu öffnen.

Maße: ca. 20 cm x 7 cm
Farbe: grün, mit Augenspülung-Symbol

Art.Nr.	Ausführung	VE
500.100.64300	Gürteltasche für 250 ml Flasche / leer	1 Stück

 **GRAMM medical healthcare GmbH**
Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Germany

Tel +49 (0)7151 27 20 18 0
Fax +49 (0)7151 27 20 18 19
Email: info@actiomedic.de
www.gramm-medical.de

Ihr Fachhandelspartner: