


Hur du ansluter Dexcom (G5 mobile/ G6 app) till diasend® - Sömlös synkronisering av datan från Dexcom till ditt diasend®-konto

Förutsättningar:

- ett diasend® Personal-konto – GRATIS för patienter!
- en Android telefon eller en iPhone och Dexcom (G5 mobile/ G6 app).

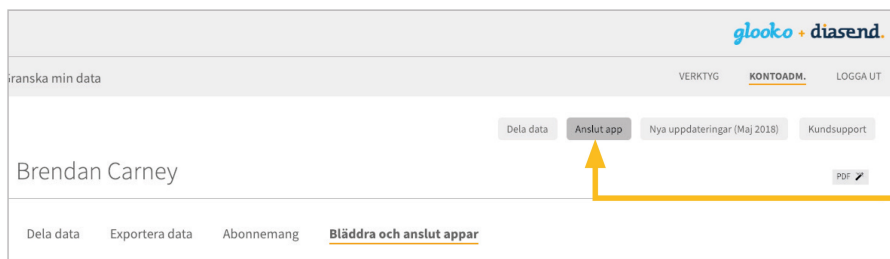


- 1 Logga in på ditt diasend® Personalkonto och klicka på knappen **Anslut app**.

Anslut app



- 2 Klicka på länken **Anslut** för Dexcom.

Anslut

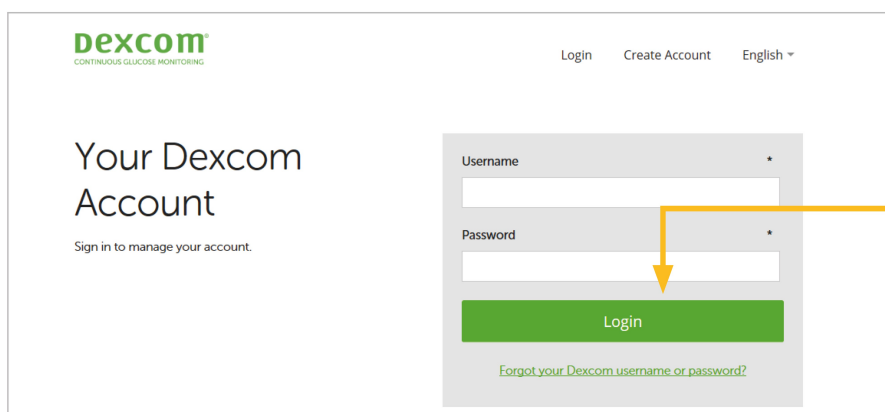

- 3 Logga in med ditt Dexcom-användarnamn och lösenord för att godkänna och lägga till Dexcom (G5 mobile/ G6 app) till ditt diasend® Personalkonto.