








DexcomG6™

Vad de olika trendpilarna betyder

	Konstant: Glukosvärdet är stabilt (stiger/sjunker inte mer än 0,06 mmol/l per minut). Glukosvärdet kan stiga eller sjunka med upp till 0,8 mmol/l på 15 minuter.
	Ökar långsamt: Glukosvärdet stiger 0,06–0,11 mmol/l per minut. Om det fortsätter att stiga med samma hastighet kan det öka upp till 1,7 mmol/l på 15 minuter.
	Ökar: Glukosvärdet ökar 0,11–0,17 mmol/l per minut. Om det fortsätter att stiga med samma hastighet kan det öka upp till 2,5 mmol/l på 15 minuter.
	Ökar snabbt: Glukosvärdet stiger mer än 0,17 mmol/l per minut. Om det fortsätter att stiga med samma hastighet kan det öka mer än 2,5 mmol/l på 15 minuter.
	Sjunker långsamt: Glukosvärdet faller 0,06–0,11 mmol/l per minut. Om det fortsätter att falla med samma hastighet kan det sjunka upp till 1,7 mmol/l på 15 minuter.
	Sjunker: Glukosvärdet faller 0,11–0,17 mmol/l per minut. Om det fortsätter att falla med samma hastighet kan det sjunka upp till 2,5 mmol/l på 15 minuter.
	Sjunker snabbt: Glukosvärdet faller mer än 0,17 mmol/l per minut. Om det fortsätter att falla med samma hastighet kan det sjunka mer än 2,5 mmol/l på 15 minuter.
Blank (ingen pil)	Om ingen förändringshastighet visas: Systemet kan inte beräkna hur snabbt glukosvärdet ökar eller minskar vid detta skede.

Använd din G6 – bruksanvisningar. LBL016313 Rev 001. MT252865285