

Uppladdning av din Omnipod DASH PDM i Diasend



För att föra över all data från din PDM, gör du följande:

1. Ange pin och lås upp skärmen på din Omnipod DASH PDM
2. Koppla PDMen till dator eller klinikers transmitter
3. Välj export på Omnipod DASH skärmen
4. Koppla bort PDMen när överföringen är klar (100%)



Välj EXPORT



Om du använder PC/Windows för uppladdningen, fortsätt med nedan steg:

5. På datorns Diasend Uploader, väljer du "Ladda upp ny"
6. Följ steg 1-4 en gång till och vänta till Uppladdningen är klar (100%)

Vid uppladdning av data från Omnipod DASH PDM till Diasend överförs alltid data från midnatt och tidigare. Ovan steg görs för att du även ska få med data för samma dag som du gör din uppladdning.



(Distributör)